

日本製

医療機関をトータルプロデュースする  
シップヘルスケアグループが  
医療機関のご要望にお応えした高機能マスク

# シップ SHIPマスク

BFE99%日本製フィルタ採用

※裏面をご参照ください。

## イヤソフトギャザー

マスクを長時間使用しても、耳が痛くなりにくい新技術を採用。

## 肌に優しいソフト素材

肌側にあたる素材が柔らかく、マスクのスレやかサカサもなく、お肌にやさしい。

## 不織布・三層構造

三層構造で、サージカル品質(認証予定)の高機能マスク。  
(国産BFE99%フィルターを採用)



使用方法

- 1 耳掛け部分を左右に引っ張り、ミシン目を切り離します。
- 2 SHIPロゴが正しく読める側を外側にして着用します。
- 3 ノーズピース(鼻あて)を鼻の形に合わせて、隙間を少なくします。
- 4 マスクの下部を下へ大きく広げ、プリーツを伸ばしてあごまで覆います。



男女兼用

約90mm×175mm ホワイト

SHIPのロゴが正しく読める側が外側です。



30枚入り

生命を守る人の環境づくり

SHIP HEALTHCARE



# SHIPマスク

BFE99%\*日本製フィルタ採用

## 医療の現場で活躍する 国産、高性能マスク。



医療従事者 50名に聞きました。  
**使用感アンケート** (複数回答)


耳掛けが柔らかく、耳が痛くない。 **48名**

肌ざわりが良く、素材が柔らかい。 **47名**

フィット感が良く、ズレない。 **26名**

自社調べ

### お肌をやさしくいたわり、耳への負担を軽減

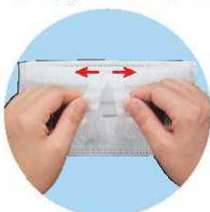

中央部を左右に引っ張り、完全に切り離します。




耳掛け部分の突出を下にして、SHIPのロゴが正しく読める側が、外側です。

耳掛けは幅広の帯タイプで耳が痛くなりにくい

耳掛け部分は、ソフトで伸縮性に優れ、また耳全体を面で覆うので、長時間連続使用しても耳が痛くなりやすいです。使用前は、耳掛け部分がマスク本体に固定されているので、耳掛け部分が乱れることなく、持ち運びに便利です。



機械、原材料から製造まで  
国産へのこだわり。  
徹底した衛生・品質管理。

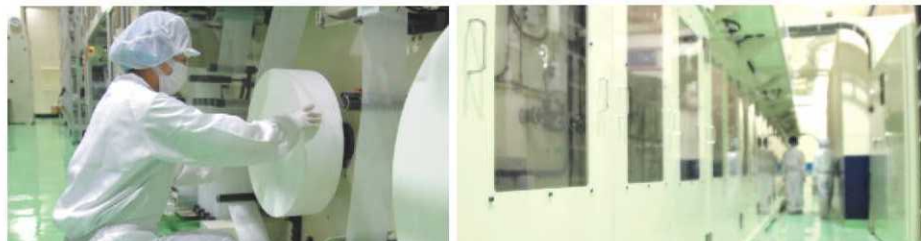

品名	枚数	希望小売価格	ケース入数	JANコード
不織布マスク 商品名 SHIPマスク	30枚	オープン	24箱 (1箱30枚)	

(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示	
品名	不織布マスク(商品名 SHIPマスク)
対象	風邪・花粉・ほこり等
素材名	本体及びフィルタ(ポリプロピレン) 耳掛け部分(ポリウレタン、ポリプロピレン) ノーズピース(ポリエチレン)
包装材の材質	紙(化粧箱) 原産国 日本

「マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。」|BFE99%日本製フィルタ採用| (一財)カケンテストセンター-BFE試験による。  
\*BFE(バクテリア濾過効率)は、マスクの濾過機能を示す基準で、病院用マスクはBFE95%以上とされています。

生命を守る人の環境づくり  
**SHIP HEALTHCARE**  
シップヘルスケアホールディングス株式会社  
〒565-0853 大阪府吹田市春日三丁目20番8号

取扱店

製造者名/株式会社瑞光メディカル 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目3番50号  
●お客様相談窓口 072-653-8877 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)  
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2020.07.20