

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）抗体検出キット （Colloidal Gold）

One Step Novel Coronavirus(2019-nCoV)IgG/IgM Test Kit

《特徴》

- ・イムノクロマト法
- ・1つのテストカードでIgGとIgM両方の検出可能
- ・血清、血漿、全血いずれかの検体で検出可能
（血清・血漿：10uL、全血：20uL）
- ・簡単操作で、約15分で検出可能
- ・目視で結果判定
- ・必要な試薬は全てキットに同梱
（試験テストカード、採血用キャピラリー、検体希釈液）
- ・室温での保管でOK（2℃～30℃）
（直射日光、高温多湿、凍結を避けてください）




血液中の新型コロナウイルスの IgM/IgG抗体（SARS-CoV-2）を検出 **15分以内**

Step 1

血液検体添加


血清・血漿：10uL
全血：20uL
試験テストカードの
滴下ウェルに添加

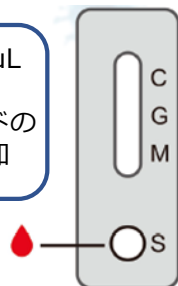

Step 2


希釈液添加

希釈液(100uL 4滴)
試験テストカードの
滴下ウェルに添加

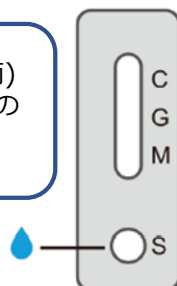

Step 3

15分で結果判定

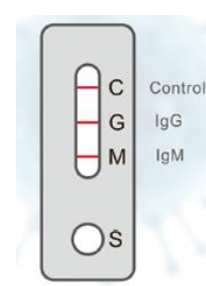


中国で500例以上の
臨床試験データ取得済

血清・血漿
（394例実施）

陽性判定率：91.01%
陰性判定率：95.37%
正診率：93.40%

全血
（110例実施）

陽性判定率：90.74%
陰性判定率：94.64%
正診率：92.73%

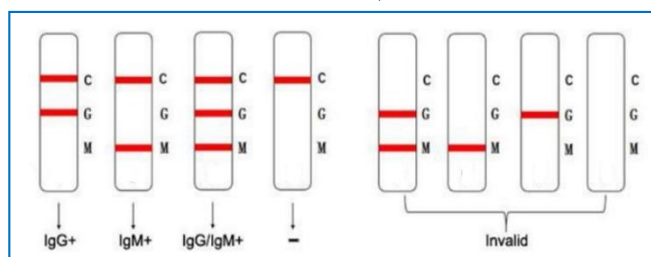

《製品概要》

製品名	規格	製品コード	構成品	数量	メーカー希望販売価格
新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 抗体検査試薬キット (Colloidal Gold) 2019-nCoV IgG/IgM test	25テスト /キット	427GENRUI	試験テストカード	25本	75,000円
			採血用キャピラリー	25本	
			検体希釈液 (2.5m l)	1本	

【使用目的】

本キットは、ヒト血清、血漿及び全血検体中の SARS-CoV-2 に対する IgM 抗体と IgG 抗体検出のための、迅速で定性的かつ簡便なイムノクロマトグラフィーで、SARS-CoV-2 への最近または過去の曝露の判定を補助するためのキットです。本キットは研究用試薬であり、疾病の診断もしくは、その補助の目的で使用することはできません。

【性能上の限界】

1. 使用説明書に従って使用してください。
2. 高温、高湿度は、試験結果に影響する可能性があります。
3. 共存物質など検体由来の要因、正しい使用方法以外の操作により誤った結果が出る可能性があります。

【保管方法】

- ・ 直射日光、高温多湿を避けて、2℃～30℃で保存してください。
- ・ 凍結を避けてください。

【有効期限】

- ・ 製造から12カ月（開封した場合は1時間以内）。
- ・ 希釈液は、開封してから室温で30日間保存可能。



製造元

Genrui

Genrui Biotech Inc

4-10F, Building 3, Geya Technology
Park, Guangming, District, 518106, Shenzhen, China